

No.2

## 高齢者の尊厳を守る 世用品選びの考え

排泄行為は個人の尊厳に関わる動作です。介護をするご家族には排泄物の処理 などの負担がありますが、それ以上に高齢者にとっては、尊厳や羞恥心などに 影響する非常にデリケートな問題です。それらを損なわないために、できるだ け今までに近い形で排泄ができるよう、排泄用品を選びましょう。



高齢者の今の能力を見極めた 上で、「できるだけ自分で行う」 をポイントに排泄用品を選びま しょう。



#### step.1

## 自宅のトイレで排泄できるようにしましょう

今まで通り、家のトイレで安全に排泄ができるように環境整備を行います。

#### トイレまでの移動



移動を補助する手すりの 設置、段差解消を行う。

#### トイレでの立ち座りなどの動作



洋式便器の場合、手すりや補高便座などで立ち座 りを補助します。

#### ※和式便器の場合は…



簡易設置型洋式トイレで和式便器を洋 式便器に変更できます。

## step.2

## 自宅のトイレへの移動が難しい場合はポータブルトイレ

補高便座

ポータブルトイレは持ち運びができ、部屋に設置できる簡易型のトイレです。また暖房便座、脱臭機能、温水シャワー機能な どを有した高機能なポータブルトイレもあります。

#### こんな人におすすめ

- トイレに座って排泄できるが 自宅のトイレまでの移動が不 安定な人に。
- 自立しているが、頻尿などで 夜間のみベッドの近くにトイ レが欲しい人に。



#### ポータブルトイレ





#### Point

尿意・便意があり座位がとれるのであれば、 積極的にポータブルトイレを使いましょう! 寝た姿勢よりも座った姿勢が排泄しやすい ので、ポータブルトイレを使うとスムーズに 排泄できます。また、排泄のたびに必要な運 動を行うので廃用性の問題も回避できます。

座った状態 座って前傾が排泄しやすい



座って前傾姿勢 をとると、直腸と 肛門の角度が開 くので、スムーズ に排便できます。



## step.3

## 座位が難しい場合はベッドの上での排泄を検討

尿意・便意のコントロールができる場合は、尿器、差し込み便器を使用します。

尿器





差し込み便器

### Point

排泄物が直接肌に触れないの で、不快感、スキントラブル、感 染のリスクを軽減できます。 また、自分で排泄できるという 自尊心を保つことができます。



# の排泄介護用品

#### 手すり

レンタル対象品 (介護保険)

住宅改修対象品 (介護保険)

最大使用者体重 100kg

洋式トイレ用フレーム S-はねあげ R-2 スチール製 55,000 円~(税抜) 洋式トイレ用フレーム SUS-はねあげ R-2 ステンレス製 65,000 円 (税抜)



トイレの立ち座りをサポート



#### 簡易設置型トイ

購入対象品 (介護保険)

最大使用者体重 100kg

サニタリエース OD 両用式 16,000 円~ (税抜) サニタリエース OD 据置式 18,500 円~ (税抜)

和式便器にかぶせるだけで洋式便器に早変わり

洋式トイレになることで、排泄時の立ち座りが楽に行えます。





段差のあるトイレには【両用式】

段差がないトイレには【据置式】

### ポータブルトイレ

購入対象品(介護保険)

組立完成品

最大使用者体重 100kg

ソフト便座、暖房便座、脱臭機 能付きタイプも選べます。



ポータブルトイレ ジャスピタ 31.000 円~ (税抜)

独自の形状が排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢に導きます!(尿こぼれを防止)









「浅座り」を防ぐ!






「ななめ座り」を防ぐ!

「股閉じ座り」を防ぐ!

家具調トイレ セレクト R 自動ラップ 128,000 円~(税抜) ※消耗品 (専用凝固剤、専用フィルムカセット) は本体に添付されていません。



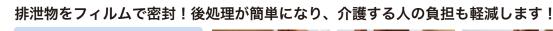













排泄後、作動ボタンを押す

ラップ済み袋を取り出す

#### 尿器

ユリフィット 尿器女性用 自立 尿器女性用

3.800円(税抜) 3,300円(税抜)

尿器男性用 3,300円(税抜)



## 差し込み便器

差し込み便器 2,800円 (税抜)







製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリータィヤル 000 0120=86=7735



